



## 1. Bedøm patienten.

Bekræft at patienten ikke reagerer.

Bekræft at patienten ikke trækker vejret eller ikke trækker vejret normalt.

Ring 112. Hjertestop = Fransk: Arret du coeur {aræ dy køør}, Engelsk: Cardiac arrest.



## 2. Tænd for hjertestarteren.

Åbn låget.

Du hører: Powered on. Stay calm. Follow the instructions.



## 3. Vælg patientkategori.

Vælg voksen eller barn på kontakten. Voksen er over 8 år og over 25 kg.

Du hører: Adult mode eller Child mode



## 4. Forbered patienten.

Blot brystet.

Brystet skal være rent og tørt. Tør af. Barber hår af, hvis der er kraftig behåring

Du hører: Remove clothing from patients chest.

Apply pads as shown on pads – Anbring elektrodepuder som vist.




## 5. Anbring elektrodepuderne.

Anbring dem som vist på tegningen.

Voksen: Den røde under højre kraveben. Den blå under venstre brystvorte.

Barn: Den blå midt på brystet mellem brystvorterne. Den røde på ryggen mellem skulderbladene.


Du hører: Apply pads firmly to patient's bare chest as shown on Pads.

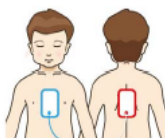

## 6. Analysér hjerterytmen.

Rør ikke ved patienten, vent til rytmen er analyseret.

Du hører: Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm.

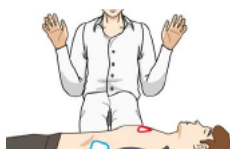


## 7. Giv stød.

Hjertestarteren giver automatisk stød, hvis det er tilrådeligt.

Du hører: Shock advised. Everyone clear. Shock will be delivered in: 3, 2, 1

Hvis stød ikke er tilrådeligt.

Du hører: No shock advised.

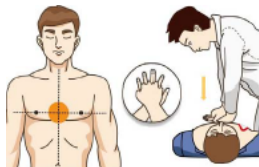

### 8. Giv Hjertemassage

Giv hjertemassage I den indikerede rytme.

Hvis tiden løber ud (2 minutter) så gentag trin 6.

Hvis patienten er ved bevidsthed og trækker vejret: Afvent ambulance/lægehjælp.