

Château d'Azans



Bedøm patienten

1. Bekræft at patienten ikke reagerer.
2. Bekræft at patienten ikke trækker vejret eller ikke trækker vejret normalt.
3. Ring 112. Hjertestop. Fransk "Arret du coeur" {aræ dy køør}, engelsk "Cardiac arrest".

Tænd for hjertestarteren

4. Åbn låget.
5. Du hører "Powered on. Stay calm. Follow the instructions".

Vælg patientkategori

6. Vælg voksen eller barn på kontakten. Voksen er over 8 år og over 25 kg.
7. Du hører "Adult mode" eller "Child mode".

Forbered patienten

8. Blot brystet.
9. Brystet skal være rent og tørt. Tør af. Barbér hår af, hvis der er kraftig behåring.
10. Du hører "Remove clothing from patient's chest".

Anbring elektrodepuder

11. "Apply pads as shown on pads" - Anbring elektrodepuder som vist på tegningen.
12. Voksen: Den røde under højre kraveben. Den blå under venstre brystvorte.
13. Barn: Den blå midt på brystet mellem brystvorterne. Den røde på ryggen mellem skulderbladene.
14. Du hører "Apply pads firmly to patient's bare chest as shown on pads".

Analysér hjerterytmen

15. Rør ikke ved patienten, vent til rytmen er analyseret.
16. Du hører "Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm".

Giv stød

17. Hjertestarteren giver automatisk stød, hvis det er tilrådeligt.
18. Du hører "Shock advised. Everyone clear. Shock will be delivered in 3, 2, 1".
19. Hvis stød ikke er tilrådeligt.
20. Du hører "No shock advised".

Giv hjertemassage

21. Giv hjertemassage i den indikerede rytme.
22. Hvis tiden løber ud (2 minutter), så gentag fra "Analysér hjerterytmen".
23. Hvis patienten er ved bevidsthed og trækker vejret: Afvent ambulance/lægehjælp.